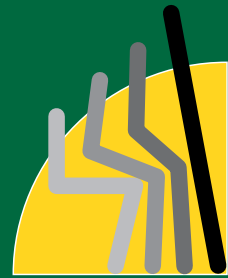


# LSA Helium

Standing  
Independence



LIFESTAND  
Permobil Corp.

- Bättre fysisk balans och allmänt välmående
- Motverkar muskelkontraktur och spasticitet
- Bättre muskelfunktion
- Minskar förkalkningar och benskörhet
- Förebygger och motverkar sittsår
- Bättre njurfunktion
- Bättre blodcirkulation
- Förbättrar tarmfunktionen

# Manuell - ny design - hightech material

LifeStand LSA manuell rullstol med uppresningsfunktion en stol för dig som är aktiv. Designad i de allra senaste materialen aluminium, titan och kolfiber.

Världens lättaste ståstol • strömlinjeformad • enkel att justera • hopfällbar

## LSA – manuell rullstol med ståfunktion för dig som är aktiv

Åk lätt res dig upp med minimal styrka

Denna rullstol från LifeStand är helt och hållet uppbyggd av extra lätta material för att kunna möta kravet på smidighet. Uppresningsfunktionen är enkel och kräver mycket lite extra kraft och du kan byta från sittande till stående ofta.

### Innovativ design

och material från flygindustrin (Alu 2017, titan och kolfiber)



### Transport

vik ner ryggstöd, ta bort knästöd och använd snabbfrigöring av hjulen så har du en liten och lätt packning. Tyngsta del 13,5 kg



### Fotplattor i kolfiber

för styrka och låg vikt. Höjd och vinkelställbara.



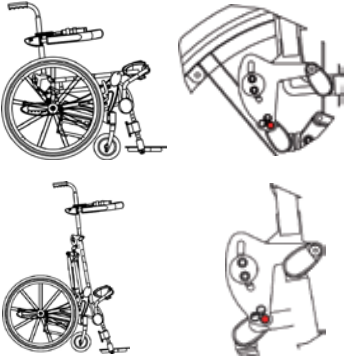
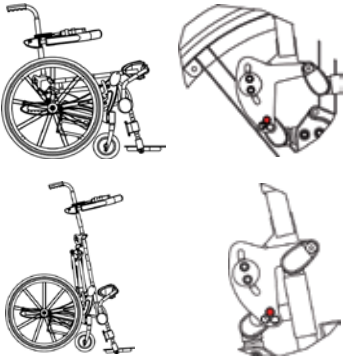
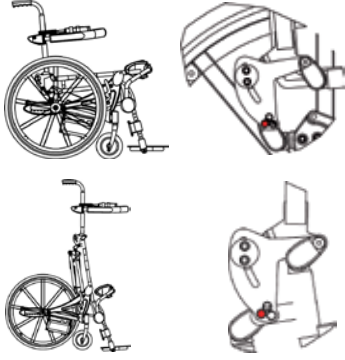
### Reglerbar rygg

Kardborrejustering



# anpassning

Genom att följa instruktionerna nedan kan du göra en del Anpassningar för att hitta bästa ståposition

Konstant vinkel	Positiv lutning	Negativ lutning
		
Du behåller den ryggstöds vinkel som du har i sittande position även när du rest dig upp.	Du kan anpassa stolen så att du kan gå från en mer vinkelrät position i sittande till 7° mer bakåtlutning av ryggstödet i upprest läge. Detta passar bäst för en aktiv person med god muskelstyrka som vill ha det rätare läget i sittande för optimal körfunktion, men gärna sträcker ut i stående.	Ryggstödet går vid uppresning sakta mot 6° lutning framåt. Detta passar den som vill ha ett mer avslappnat sittande såväl som stående. I stående ställning med lutning framåt krävs armstöd eller bälte.

## övriga val

- 4 färger
- 6 sidsbredder
- 2 storlekar drivhjul, 24" och 26"
- 2 längder uppresningshandtag
- Swing-away armstöd
- Luftfyllda och solida däck
- Anti-tipp hjul
- Fasta ryggstöd
- Midjebälte
- Stöd
- Dynor



### KNÄSTÖD

Stoppade, böjbara stöd för perfekt passform.



### UPPRESNINGSHANDTAG

Säker och effektiv uppresning

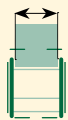




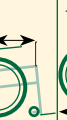







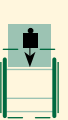


### SWING AWAY ARMSTÖD

Tillval



# tekniska specifikationer

CE														
	Sitsbredd	Sithöjd fram 4°sitslutning	Drivhjulstorlek	Framhjulstorlek	Sitsdjup	Total längd sittande	Total längd stående	Total bredd 0° hjulvinkel	Total bredd 3° hjulvinkel	Ryggstöds höjd	Total stolshöjd	Max brukarvikt	Stolens vikt	Tyngsta del transport
LIFESTAND LSA HELIUM	360	510	24"	125	430 till 530	890 till 1010	930 till 1050	600/24"	660/26"	320 till 450	780 till 910	100	16	13,5
	380	510	24"	125				620/25"	680/27"			100		
	400	510	24"	125	640/26"	700/28"	100							
	420	510	24"	125	17"	35"	37"	660/26,5"	720/28,5"	12,5"	31"	100		
	440	510	24"	125	till 21"	till 40"	till 41"	680/27,5"	740/29,5"	till 18"	till 36"	100		
	460	510	24"	125				700/28"	760/30"			100		
	mm	mm	tum	mm	mm/tum	mm/tum	mm/tum	mm/tum	mm/tum	mm/tum	mm/tum	kg		

Beställs hos:

Permobil AB  
Box 120  
861 23 Timrå

Tel. 060-59 59 02  
supportgruppen@permobil.se

www.permobil.se

