

ROHO® pude

Bemærk venligst:

Ved levering er ventilen åben.

Puden er således klar til at blive pumpet op.

For indstilling af ROHO®

QUADTRO® SELECT® og

Contour Select™ se bagsiden.

permobil

dk@permobil.com · www.permobil.com

Korrekt indstilling af ROHO® QUADTRO® SELECT® og Contour Select™



- 1 Tryk den **grønne knap** ind.
Åbn ventilen og pump luft i puden.
- 2 Fjern pumpen og luk ventilen.
- 3 Sæt brugeren på puden.
- 4 Læg hånden mellem brugerens laveste stikkende knoglefremspring og puden.
Luk luft ud fra ventilen til brugeren synker ned i puden. Når hånden rører pudens bund, lukkes ventilen.
- 5 Ret op til den ønskede siddestilling, og tryk den **røde knap** i bund. Luften isoleres nu i de 4 kamre og giver stabilitet.
- 6 Kontrollér, at brugeren ikke sidder igennem ved at lægge hånden under knoglefremspringet. Ved ændring af siddestilling: Tryk den **grønne knap** ind og gentag trin 5 og 6.

