

NL




# SNEL AAN DE SLAG

QUICK START GUIDE



*The Art of Mobility*

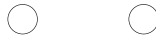

# SNEL AAN DE SLAG

## QUICK START GUIDE

## INHOUD

Introductie	1
<b>1</b> Snelheidsinstelling en stuurkast opties	2
<b>2</b> Rijtechniek	8
<b>3</b> Instelling arm- en beensteunen	9
<b>4</b> Opladen van de accu's	10
<b>5</b> Remmen ontkoppelen (Vrijloop)	11
<b>6</b> Steun bij holle rug	12
<b>7</b> Bediening verstellingen	13
<b>8</b> Voor rolstoelen met STA-OP-VOORZIENING (SOV)	14
<b>9</b> Voor rolstoelen met omkeerbare stuurkast	15
<b>10</b> Hoofdsteun (accessoire)	16


## Introductie

Bij Permobil ligt de nadruk meer op oplossingen dan op producten. Oplossingen voor gecompliceerde klantenbehoeften en oplossingen voor specifieke zit- en mobiliteitsbehoeften.

Onze productlijn omvat chassis en een aantal zitsystemen die beantwoorden aan zowel eenvoudige als complexe mobiliteits- en zitbehoeften. De naadloze integratie van de juiste chassis en zitonderdelen zorgt voor een perfect op de gebruiker afgestemde elektrische rolstoel.



# 1. SNELHEIDSINSTELLING EN STUURKAST OPTIES

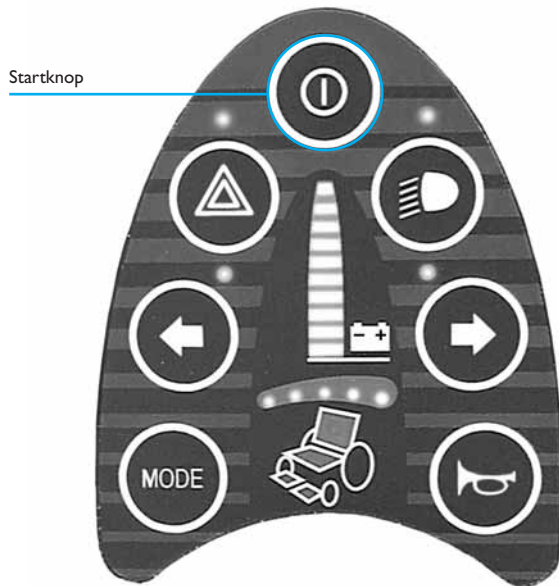

Deze rolstoel is geschikt voor zowel binnen- als buitenshuis gebruik.

Bij gebruik binnenshuis moet de normale voorzichtigheid in acht worden genomen. Buitenshuis moet u ervoor zorgen dat u heel langzaam rijdt op steile heuvels en niet rijdt over randen die hoger zijn dan 7 cm.

Maak de eerste proefrit niet alleen. Een proefrit is immers bedoeld om te kijken hoe u met de rolstoel om moet gaan, en daar heeft u misschien hulp bij nodig.


## SNELHEIDSINSTELLING

1. Schakel de stroom in door op de startknop op het bedieningspaneel te drukken.

2. De snelheid kan in 5 standen worden gezet. Het gekozen snelheidsbereik wordt door een of meer indicatielampjes aangegeven. De instelling van de snelheidswaarden:

- 1 - 2 lampjes = Lage snelheid
- 3 - 4 lampjes = Gemiddelde snelheid
- 5 lampjes = Maximumsnelheid

Stel het geschikte snelheidsbereik in door eerst op de "MODE-knop" te drukken en vervolgens met de bedieningshendel de snelheid te kiezen tot het indicatielampje voor de rijstijl van uw keuze brandt.

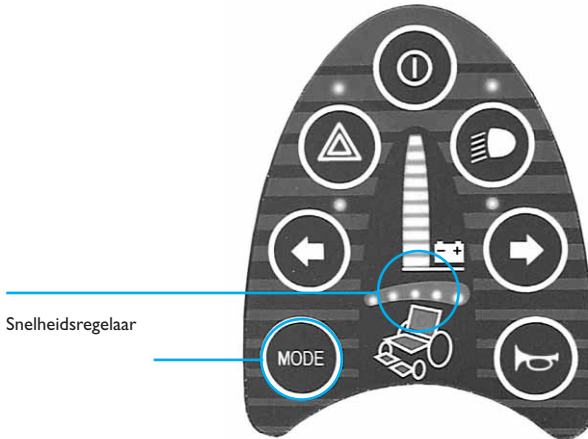

- Snelheid verhogen = stapsgewijs naar rechts.
- Snelheid verminderen = stapsgewijs naar links.
- Bevestigen vd gekozen snelheid = hendel naar voren bewegen of op de MODE-knop drukken.

## STUURKAST OPTIES (MODE-FUNCTIE)


Met behulp van de "mode-functie" kunnen de snelheid (5 standen), de stoellift, de rugverstelling, de kantelverstelling en de beensteunen van de rolstoel met de bedieningshendel worden geregeld. Dat wil zeggen alle functies die normaal gesproken met de drukknoppen van het knoppenkastje worden geregeld.

### Bediening van de "mode-functie":

1. Schakel de schakelaar van het bedieningspaneel in.
2. Druk op de knop "MODE". De accu-indicator brandt en de lichtdiode van de snelheidsregelaar knippert. Verhoog of verlaag de snelheid door de joystick naar rechts of naar links te bewegen.
3. Druk op MODE om verder te gaan in het programma. Het lampje van de rechter voetsteun brandt. Nu is het mogelijk om de beensteun naar voren of naar achteren te bewegen door de bedieningshendel naar voren of naar achteren te bewegen.
4. Beweeg de bedieningshendel twee keer naar rechts zodat het lampje van de zitting gaat branden. Door de bedieningshendel naar voren of naar achteren te bewegen wordt de stoellift verhoogd of verlaagd.
5. Beweeg de bedieningshendel naar rechts, zodat de lampjes van de zitting en de rugleuning allebei gaan branden. Dit betekent dat de kantelverstelling is geactiveerd en dat deze geregeld kan worden door de bedieningshendel naar voren of naar achteren te bewegen.
6. Beweeg de bedieningshendel naar rechts, zodat het lampje van de rugverstelling gaat branden. De rugleuning kan traploos geregeld worden door de bedieningshendel naar voren of naar achteren te bewegen.
7. Druk op de knop "MODE" om het programma af te sluiten. De rolstoel is nu gereed voor gebruik.

## 2. RIJTECHNIEK

De elektronica van het bedieningspaneel “interpreteert” de bewegingen van de joystick en voert de bedoelde verplaatsing van de rolstoel uit. Bij normaal rijden zijn geen ingewikkelde gebruikstechnieken nodig, wat een voordeel is bij een onervaren gebruiker. Een goede aanvangsmethode is de joystick simpelweg in de richting te verplaatsen waar men naartoe wil. De rolstoel rijdt vervolgens in de richting waar de joystick naartoe wijst.

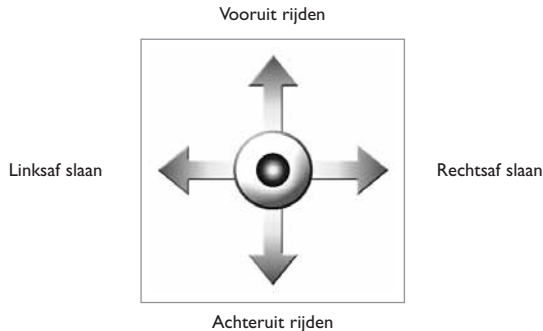

### LET OP!

Denk er altijd aan zo geleidelijk mogelijk te rijden en krachtig te remmen en abrupte zijdelingse bewegingen te voorkomen.

## 3. INSTELLING ARM- EN BEENSTEUNEN

Permobil stelt de arm- en beensteunen zo veel mogelijk in naar de wensen van u als gebruiker. Uw dealer is bij de aflevering verantwoordelijk voor de definitieve afstelling hiervan.

### Instelling armsteunen

#### 1. Hoogteinstelling



#### 2. Hoek-/diepte instelling



## 4. OPLADEN VAN DE ACCU'S

Voor een optimale rijtijd per oplaadbeurt en een lange levensduur dienen de accu's regelmatig te worden opgeladen. Schakel de rolstoel altijd uit als deze niet wordt gebruikt en rijd de accu's niet helemaal leeg. Maak er een gewoonte van de accu's op te laden als u de rolstoel niet gebruikt. Op het bedieningspaneel van de rolstoel is via de accuspanning te zien of de accu's moeten worden opgeladen. Als de accu's toch leeg mochten raken, is het van belang de accu's zo snel mogelijk op te laden, omdat volledig ontladen de levensduur van de accu's verkort. Het laadpunt bevindt zich bij de meeste van onze rolstoelmodellen direct boven de accu's.



Laadcontact van C500

### LET OP!

De lader kan warm worden en mag om die reden niet worden afgedekt. De lader moet aan alle kanten vrijstaan.

## 5. REMMEN ONTKOPPELEN (Vrijloop)

Het is mogelijk de remmen te ontkoppelen, zodat de rolstoel met de hand kan worden verplaatst.

1. Schakel de rolstoel met behulp van de startknop uit.
2. Zet de hendel omhoog. De rolstoel kan nu met de hand worden verplaatst.

Remontkoppelingshendel met veiligheidspal op C500

Ontkoppelde remmen met veiligheidspal



Geactiveerde remmen




### LET OP!

Activeer de remmen na het verplaatsen opnieuw door de hendel terug te zetten. Als de remmen zijn ontkoppeld, kan de rolstoel niet worden bediend.

## 6. STEUN BIJ HOLLE RUG

De steun bij holle rug (lumbaalkussen) bestaat uit een drietal kussen met klittenband die afhankelijk van de mate van ondersteuning kunnen worden veresteld.

1. Verwijder het rugkussen.
2. Stel de steun naar wens in.
3. Zet het rugkussen terug.

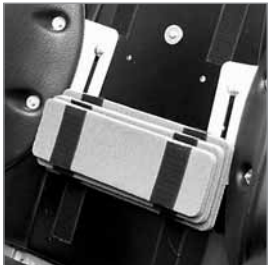

Close-up: lumbaalkussen




Hoogteinstelling van het lumbaalkussen

## 7. BEDIENING VERSTELLINGEN

### Knoppenkastje (Pilot+ bedieningspaneel)

Met behulp van de drukknoppen op het knoppenkastje regelt u de elektrische functies van de zitting.

Knoppenkastje (Pilot+)

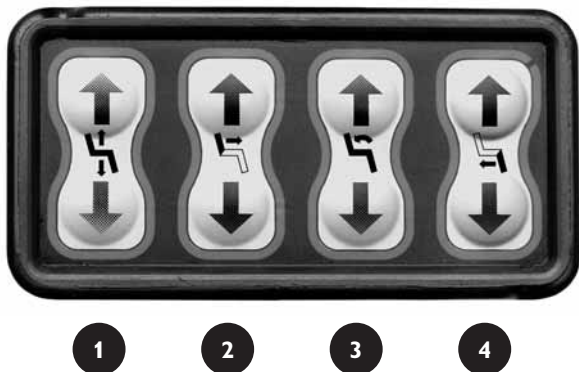

#### LET OP!

Het aantal beschikbare functies en hun plaats kunnen variëren, al naargelang de wijze waarop uw rolstoel en zitting zijn uitgerust.

### 1. Stoellift

De zitting gaat omhoog wanneer het bovenste deel van de stoelliftknop wordt ingedrukt en gaat omlaag als het onderste deel van deze knop wordt ingedrukt.

### 2. Rugverstelling

De rug kantelt naar voren wanneer het bovenste deel van de knop voor het hellen van de rug wordt ingedrukt en naar achteren als het onderste deel van deze knop wordt ingedrukt.

### 3. Kantelverstelling

De zitting gaat naar voren wanneer het bovenste deel van de knop voor het hellen van de zitting wordt ingedrukt en kantelt naar achteren als het onderste deel van deze knop wordt ingedrukt.

### 4. Beensteun

De beensteun gaat naar voren wanneer het bovenste deel van de knop voor de beensteun wordt ingedrukt en naar achteren als het onderste deel van deze knop wordt ingedrukt.

#### TIP:

in de meeste gevallen kunnen de verstellingen ook via de mode-functie worden bediend.

## 8. VOOR ROLSTOELEN MET STA-OP-VOORZIENING (SOV)

Op het moment dat u uit wilt stappen, drukt u op het knopje (meestal gemonteerd in de armlegger of transferhandels) en zakt de voetenplaat naar de vloer. Zodra de dunne plaat de grond raakt, wordt de lift geactiveerd en gaat de stoel omhoog. U komt zo in de meest optimale positie om uit te stappen.

Met behulp van de gemonteerde transferhandels schuift u een stukje naar voren zodat uw voeten de grond weer raken. Vervolgens laat u de stoel zo ver omhoogkomen totdat u gemakkelijk kunt gaan staan.

Permobil kan de rolstoelmodellen C300 Corpus, C400 Corpus, C500 Corpus en Hexior Corpus standaard voorzien van deze Sta-Op-Voorziening.



SOV uitgevoerd op Hexior

## 9. VOOR ROLSTOELEN MET OMKEERBARE STUURKAST

Standaard wordt de omkeerbare joystickbesturing gemonteerd in een kast zoals te zien is op de foto.

De omkeerbare joystickbesturing is gelijk aan de joystickbesturing maar in deze uitvoering is de joystick geplaatst in een behuizing die gemonteerd wordt in een werkblad. De joystick van deze besturingsmodule is een proportionele joystick die bediend kan worden met de vingers of de hand. Met de ontgrendelknop bovenaan de stuurkast kan de gehele behuizing omgekeerd worden door de ovale ontgrendelknop in te drukken.

Omkeerbare joystickbesturing gemonteerd in werkblad







*The Art of Mobility*

[www.permobil.com](http://www.permobil.com)