



KÖR SÄKERT

Med vårt nya billås Permolock C3 kan du nu köra eller åka med i Permobil C300, C350, K450 eller K300 PS Jr rullstolen. Permolock C3 kan även användas som transportlås och placeras då i sidled bakom förarstolen. Låset är litet och smidigt och därför enkelt att hantera och montera. Justerbarhet både i vinkel och höjddled underlättar montering av låset, framför allt på sluttande underlag. En annan ny funktion är att du kan backa in i låset med din rullstol. Låset kan monteras både på förar och passagerarplatsen i alla sorters fordon som är lämpliga för elektriska rullstolar. Permolock C3 är dessutom garanterat servicevänligt. Tack vare den smarta konstruktionen behöver endast låsets lock tas bort vid service.

PERMOLOCK
C3



Låset består av två enheter; två tappar monterade på undersidan av rullstolens chassi, samt en låsplatta monterad i fordonet.



Lättinstallerad dockningsenhet som håller stolen i en fast position.



Låsets höjd kan ställas in i 5 mm steg. Vinkelställbarheten förenklar vid sluttande underlag.



Kontrollknapp i panelen med belysning som visar om stolen är korrekt låst. Bara tryck för att frigöra stolen.



Manuell frigöring framtill på låset.


TILLBEHÖR



Ett kompletterande frigöringshandtag som kan monteras lättåtkomligt.



Stolsunderrede gör det möjligt att använda en originalbilstol i låset.

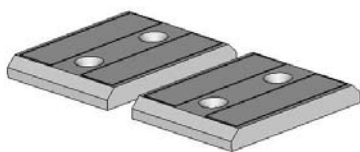

Distansplattor som används vid montering på sluttande underlag.



The Art of Mobility™

Box 120, 861 23 Timrå
Tel: +46(0)60-595900

Snickarv. 1C, 132 38 Saltsjö-Boo
Tel: +46(0)8-7477840

Mekanikerv. 6, 564 35 Bankeryd
Tel: +46(0)36-371799

Industrig. 22, 504 62 Borås
Tel: +46(0)33-131634

www.permobil.se