



**Permobil**  
**Vridplatta E90R**



# PERMOBIL VRIDPLATTA E90R

Vridplatta Permobil E90R är konstruerad för att få ett optimalt rörelsemönster i moderna personbilar och därmed ge största möjliga utrymme för benen vid in och urstigning.

Vridplattan är försedd med en unik funktion som gör att sitsens bakkant sänks ca 50mm när den är invriden och befinner sig i bilens längdriktning. Detta för att ge en bättre sittkomfort vid färd.

Bilstolen kan justeras elektriskt och steglöst i färdriktningen.

Bälteshonan är monterad i stolen och bältet kan därför sättas på när stolen är i utvridet läge.

Vridplattan är konstruerad med lägsta möjliga bygghöjd.

## Handhavande

Stolen manövreras via en tvåknapps handkontroll med spiralsladd eller trådlös fjärrstyrning (option).

Stolen rör sig så länge knappen hålls inne.

Är stolen försedd med justerbara skenor kan den i utvridet läge skjutas ut ca 15cm vilket ytterligare underlättar in och urstigning.

## Tillbehör

Profiler för fast montage av Recaro stol.....art Nr.500698

Universal monteringskonsoll.....art.Nr.500800

Dubbelspärrede glidskenor Recaro.....art.Nr.500027

## Tekniska data

Max personvikt.....120 kg

Egenvikt.....38 kg

Drivning av vridningen.....Elektrisk 12V

Strömförbrukning.....Strömbegränsare 10A

Ytbehandling.....Svartkromatering

Färg.....Svart

## Måttuppgifter

Längd.....530mm

Bredd.....500mm


Höjd.....75mm



*Stolen rör sig först bakåt.  
Ca 100mm innan den når sitt  
bakre läge börjar stolen att höjas  
i bakkant.*



*Stolen börja svänga utan att röra  
sig framåt, när framåtrörelsen  
börjar har stolen höjts färdigt och  
ligger nu parallellt med tröskeln*

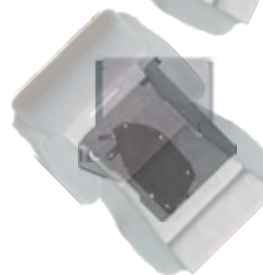

*Stolen rör sig runt B-stolpen  
optimalt*



*Här har stolen svängt max,  
ca100°. Ändläget är justerbart*



**The Art of Mobility™**

Box 120, 861 23 Timrå  
Tel: +46(0)60-595900

Snickarv. 1C, 132 38 Saltsjö-Boo  
Tel: +46(0)8-7477840

Mekanikerv. 6, 564 35 Bankeryd  
Tel: +46(0)36-371799

Industrig. 22, 504 62 Borås  
Tel: +46(0)33-131634

[www.permobil.se](http://www.permobil.se)

Vridplatta Permobil E90R är krocktestad och godkänd för att uppfylla kraven enl. EG-direktiv 74/408/EEC (sektion 3.2.5-3.2.8.) samt 96/37 EC, ECE-R 17. Test även gjort enligt krav ställda i VVFS 2003:22 kap. 29, §2 och EEC sektion 3.2.5-3.2.8. Bältesinfästningspunkter är testade enl. Direktiv 76/115/EEC samt kompletterande direktiv 81/575/EEC, 82/318/EEC, 90/629/EEC samt 96/38 punkt 5 (Testning)